




LIFE'S WORTH IT

R-shield vás chráni pred patogénmi, smogom a inými nečistotami v ovzduší

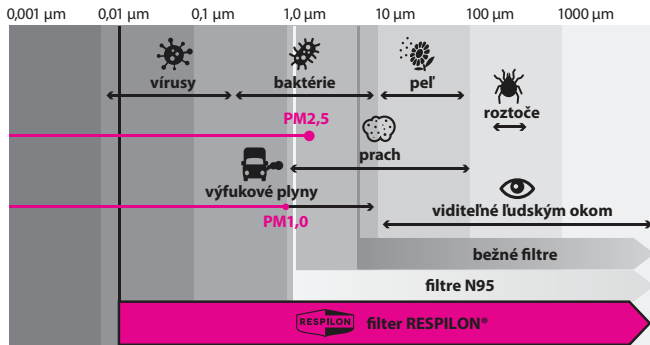

Vážený zákazník,

R-shield kombinuje spoľahlivú ochranu dýchacích ciest a štýlový vzhľad. Vďaka špeciálnemu nanovláknovému filteru zachytí 99,9 % nebezpečných častíc z ovzdušia a zároveň zostáva vysoko priedušný. Je vhodný pre rodiny s deťmi, bežcov, turistov, chodcov, cyklistov, motocyklistov i lovcov. Vysoko kvalitný strečový materiál bez akýchkoľvek chemikálií odvádza pot a vlhkosť. Vďaka tvarovateľnému nosnému klipu prechádza vdychovaný vzduch cez nanovláknovú membránu, ktorá tak účinne chráni vaše dýchacie cesty.

“R” v názvu R-shield znamená:

RESPILON® hi-tech nanovláknový filter
Rezistencia proti znečistenému vzduchu a časticiam PM_{2,5} a PM_{1,0}
Revolúcia v osobnej ochrane zdravia
Redukcia množstva plastového odpadu z jednorázových rúšok vďaka opakovane prateľnej konštrukcii
Relevantná ochrana na letné dni a šport

Prečo je R-shield najlepší?

Jedinečný nanovláknový filter RESPILON®, ktorý je súčasťou tohto nákrčníku, vyniká vyššou filtráciou smogových častíc PM_{2,5} a PM_{1,0} v porovnaní s inými dostupnými produktami a súčasne zostáva výborne priedušný. Európske, americké a čínske nezávislé laboratória potvrdzujú, že nanovláknový filter RESPILON® zachytáva 99,9 % najškodlivejších vzdušných častíc a patogénov.

Varovanie:

Výrobok nie je vhodný pre deti do 2,5 roku. V prípade jeho používania musí byť dieťa pod neustálym dohľadom zodpovednej dospelšej osoby. Detská verzia R-shield | kids je určená pre deti do max. váhy 40 kg. Chránite pred ohňom.

Balenie obsahuje jeden kus nákrčníku R-shield.

Zloženie:


Nákrčník:
89% polyester, 11 % elasthan
Nanovláknová membrána: 99,99 % polypropylen



Vyrobené v Európskej únii

Návod na použitie:

Z dôvodu ochrany pred vírusmi a baktériami nasadte nákrčník v čistom a čo najmenej rizikovom prostredí.

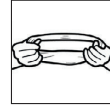


1. Zrolujte nákrčník.




2. Opatrne ho pretiahnite cez hlavu.



3. Nanovláknový filter posuňte tak, aby bol pred vašimi ústami

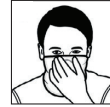

4. Pritlačte nosný klip ku koreňu nosa. Tým zaistíte, že vdychovaný vzduch bude prechádzať cez filter.

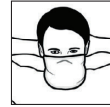

5. Pomocou vzadu umiestnenej elastickej šnúrkou s plastovou brzdičkou upevnite nákrčník v požadovanej polohe.

Uistite sa, že máte nanovláknovú membránu umiestnenú v oblasti pred nosom a ústami.

Pokiaľ sa potrebujete občerstviť, nákrčník stiahnite z koreňa nosu pod bradu a ponechajte ho na krku. Dbajte na to, aby nanovláknový filter zostal „schovaný“ vo vnútri nákrčníku. Nákrčník nikdy neodkladajte - týmto predídete kontaminácii. **Pred i po manipulácii s nákrčníkom si dôkladne vydezinfikujte ruky antibakteriálnym géлом s obsahom alkoholu.**

Pokiaľ sa chránite pred vírusmi a baktériami, nákrčník po každom použití vyperte, ak vyhodnotíte, že ste sa nachádzali v rizikovom prostredí.

Návod na údržbu:

1. Nákrčník perte samostatne v práčke na programe ručné pranie pri teplote vody 30°C iba s pracím práškom.

Väčšie množstvo vody v práčke postačí k tomu, aby odplavilo rezíduá vírusov.

2. Nepoužívajte aviváže, bieliadlá, ani agresívne čistiace prostriedky.

3. Nežmýkajte v práčke / nedrhňte ručne.

4. Nesušte v sušičke.

5. Po vypraní nechajte nákrčník voľne uschnúť / odstať 12 - 24 hod.

R-shield nesterilizujte dezinfekciou, ozónom, či pomocou UV lampy, nedávajte do mikrovlnnej rúry, nežehlite / nenaparujte a nijako nevystavujte vyššej teplote.

Porušením vyššie uvedených pokynov môže prísť k trvalému poškodeniu nanovláknového filtra a tým k zníženiu jeho účinnosti.



Ďakujeme za Vašu dôveru. Ak budete spokojný ponúkame Vám aj ďalšie výrobky s technológiou a nano filtrom Respilon.